



Implantovateľný monitor srdca
CONFIRM Rx™

ZACHYTENIE RYTMU ŽIVOTA



UROBTE PRVÝ KROK
DIAGNÓZA ZNAMENÁ PODPORU.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu myMerlin™ pre implantovateľný monitor srdca Confirm Rx™ ešte dnes.



ZÍSKAJTE ODPOVEDE

Implantovateľný monitor srdca (ICM) Confirm Rx™ od spoločnosti Abbott nepretržite monitoruje vaše srdce bez prerušenia vášho životného štýlu. Môžete si užívať každodenné aktivity, zatiaľ čo monitor ICM zabezpečí, aby váš lekár dostal potrebné informácie na vytvorenie plánu starostlivosti, ktorý je pre vás vhodný.



Skutočná veľkosť produktu



ZACHYTENIE RYTMU ŽIVOTA POMOCOU MONITORA ICM CONFIRM Rx™



PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE

Časom môže dôjsť k epizódam. To je dôvod, prečo monitoruje ICM Confirm Rx™ nepretržite zaznamenáva váš srdcový rytmus (srdcový tep) až dva roky.



APLIKÁCIA S JEDNODUCHÝM POUŽÍVANÍM

Mobilná aplikácia myMerlin™ komunikuje s vašim monitorom ICM Confirm Rx™. Váš lekár môže zistiť, kedy vaše srdce začne biť inak. Pomocou tejto aplikácie môžete zachytiť svoje vlastné symptómy aj vy, keď niečo nie je v poriadku.

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Vaše osobné údaje sú zabezpečené a šifrované.



TENKÝ PROFIL

Monitor ICM Confirm Rx™ je tenký a diskretný. Pomocou malej pomôcky a diskretnej mobilnej aplikácie myMerlin™ budete vedieť, že ste monitorovaní – ale nikto iný to vedieť nemusí.

NAČÚVAJTE SVOJMU TELU

Ak niečo nie je v poriadku, môžete svoje symptómy zaznamenať pomocou mobilnej aplikácie myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™, takže váš lekár bude mať ešte lepšiu predstavu o tom, čo sa deje. Zahŕňa to pocit závratu alebo mdloby či dýchavicu.



UROBTE PRVÝ KROK
**DIAGNÓZA ZNAMENÁ
PODPORU.**

Navštívte stránku **ConfirmYourRhythm.com**
a získajte ďalšie informácie o monitore ICM
Confirm Rx™.

NIE STE SAMI

Mat'nepravidelný srdcový rytmus (srdcový tep) alebo zažívať nevysvetliteľné mdloby môže byť častejšie, ako si myslíte. Srdcový rytmus každého človeka je iný, a preto sa poraďte so svojím lekárom o tom, ako sa cítite, aby mohol určiť, čo sa deje.





JE TO
LIEČITEĽNÉ

Nepravidelný srdcový tep je
možné jednoducho liečiť, ak sa
diagnostikuje

5 x
VYŠŠIE RIZIKO CMP

Predsieňová fibrilácia vás
vystavuje väčšiemu riziku
cievnej mozgovej príhody¹

33,5
MILIÓNA

Ľudí na celom svete má
predsieňovú fibriláciu²

VIAC
ŽIEN


Ženy trpia predsieňovou
fibriláciou častejšie ako muži³

ČO JE TO **NEPRAVIDELNÝ SRDCOVÝ TEP?**

Rytmus vášho srdca (srdcový tep) prirodzene spomaľuje alebo zrýchľuje, pričom jeho hodnota je medzi 60 až 100 úderov za minútu.

Ak vaše srdce bije pomalšie alebo rýchlejšie ako 60 až 100 úderov za minútu, môžete mať nepravidelný srdcový tep nazývaný arytmia.

EXISTUJÚ TRI BEŽNÉ DRUHY NEPRAVIDELNÉHO SRDCOVÉHO TEPU.

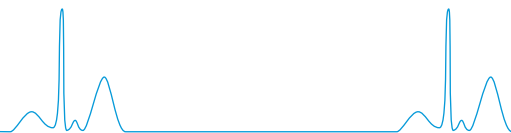

POMALÝ

Srdcový tep s hodnotou menej ako 60 úderov za minútu sa nazýva **bradykardia**.



RÝCHLY

Srdcový tep s hodnotou viac ako 100 úderov za minútu sa nazýva **tachykardia**.



PAUZA


Prerušenie v pravidelnom srdcovom rytme, keď vaše srdce niekoľko sekúnd nebije, sa nazýva **pauza**.

Normálne srdcové tepy sa líšia v závislosti od osoby – poraďte sa so svojím lekárom o špecifickom normálnom srdcovom rytme.

ČO JE TO PREDSIEŇOVÁ FIBRILÁCIA?

Ak máte **predsieňovú fibriláciu** (AF), predsieň vášho srdca bijú veľmi nepravidelne, frekvenciou 350 až 600 úderov za minútu. Toto nepravidelné bitie môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody.

Symptómy nie sú vždy zjavné, ale môžete mať ťažkosti s ľahkým cvičením alebo činnosťou bez toho, aby ste cítili únavu alebo dýchavičnosť. Poradte sa so svojím lekárom, aby zistil, čo sa deje.

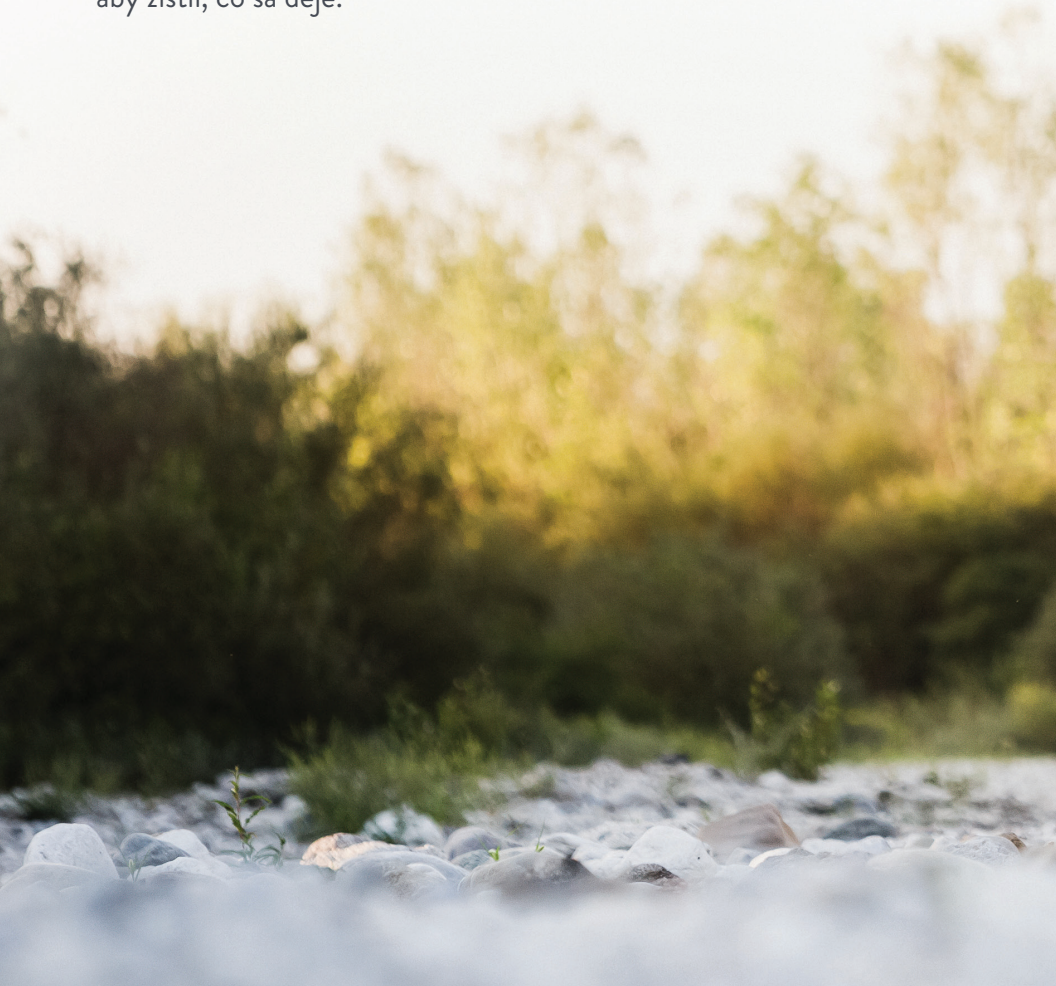

ČO SÚ TO NEVYSVETLITEĽNÉ MDLOBY?

Mdloby sa nazývajú aj **bezvedomie** a môžu súvisieť so srdcom. Symptómy zahŕňajú pocit závratu, zmeny zraku, pocit na vracanie (nevoľnosť) alebo neschopnosť stáť.



SME V TOM SPOLOČNE

Zistiť, čo spôsobuje nepravidelný tep alebo mdloby, môže byť náročné. Váš lekár s vami bude diskutovať o vašej anamnéze a vykoná telesné vyšetrenie. Na základe posúdenia lekára môžete absolvovať ďalšie testovanie, ako napríklad krvný test alebo elektrokardiogram (ECG alebo EKG).



EXISTUJE MNOHO SPÔSOBOV, AKO MONITOROVAŤ VAŠE SRDCE.

Ak lekár rozhodne, že monitorovanie je potrebné, existuje niekoľko spôsobov, ako monitorovať vaše srdce.

IMPLANTOVATEĽNÝ MONITOR SRDCA

Monitor ICM sa umiestni pod kožu blízko vášho srdca a monitorovanie sa môže vykonávať až dva roky.

HOLTEROV MONITOR

Malé vodivé nálepky (elektrody) prilepené na hrudník a pripojené k malému zaznamenávaciemu monitoru zaznamenávajú srdcový tep až dva dni.


ZÁZNAMNÍK UDALOSTÍ

Záznamník môžete používať až 30 dní. Upevní sa na kožu a ak pocítite príznaky zatlačíte ho.

NOSITEĽNÉ POMÔCKY

Predsieňovú fibriláciu dokážu pomôcť identifikovať hodinky Apple Watch[†]. Ak vaša nositeľná pomôcka zistí nezvyčajný srdcový rytmus, poraďte sa so svojím lekárom.

AKO MONITOR ICM CONFIRM Rx™ FUNGUJE?

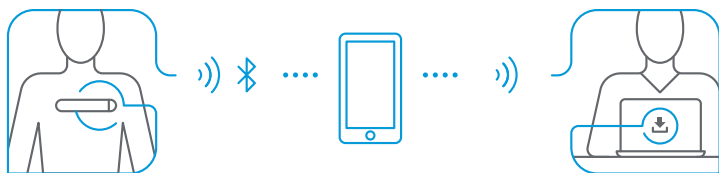

UMIESTNENIE MONITORA ICM CONFIRM Rx™

Monitor ICM Confirm Rx™ sa umiestni pod kožu nad vaše srdce. Umiestnenie je rýchle a doba zotavenia je krátka.

PRIPOJENIE K MOBILNEJ APLIKÁCII MYMERLIN™

Spárujte svoj monitor ICM Confirm Rx™ s mobilnou aplikáciou myMerlin™ a spustíte neprerušované zhromažďovanie údajov o srdcovom tepe.

MOBILNÁ APLIKÁCIA MYMERLIN™ BEZPEČNE ODOSIELA ÚDAJE*

Mobilná aplikácia myMerlin™ automaticky odosiela údaje o vašom srdcovom tepe na vašu kliniku na základe nastavení, ktoré vykonal váš lekár.

*Údaje prenášané v rámci aplikácie sú zabezpečené a šifrované.

AKO SA UMIESTŇUJE?

Umiestnenie monitora ICM Confirm Rx™ je jednoduchý zákrok, ktorý trvá veľmi krátko. Skôr ako sa urobí malý rez, váš hrudník bude znecitlivnený a vyčistený. Monitor sa umiestni tesne pod kožu nad vaše srdce. Potom sa rez uzavrie stehom alebo spojom. Teraz ste pripravení spárovať svoju pomôcku ICM Confirm Rx™ s mobilnou aplikáciou myMerlin™.

PRIPRAVTE SA NA ZAZNAMENÁVANIE

Aby ste mohli odosielať údaje o srdcovom tepe svojmu lekárovi, budete potrebovať mobilnú aplikáciu myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™. Mobilnú aplikáciu myMerlin™ si stiahnite z obchodu Apple® App Store® alebo Google Play® ešte pred zavedením monitora ICM Confirm Rx™.



OTVORTE OBCHOD S MOBILNÝMI APLIKÁCIAMI

Na domovskej obrazovke otvorte obchod s aplikáciami smartfónu.



VYHĽADAJTE MOBILNÚ APLIKÁCIU MYMERLIN™ PRE MONITOR ICM CONFIRM RX™

Ťuknite na lupu  a vyhľadajte mobilnú aplikáciu myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™. Túto bezplatnú aplikáciu si stiahnite a nainštalujte ešte pred zákrokom.



POZRITE SI UKÁŽKY

Pozrite si interaktívnu ukážku a zistite viac informácií o tom, ako spárovať pomôcku, zaznamenávať symptómy alebo udržiavať monitor srdca pripojený.

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO TIPOV A ZOSTAŇTE PRIPOJENÍ



NEHAJTE MOBILNÚ APLIKÁCIU MYMERLIN™ PRE MONITOR ICM CONFIRM Rx™ OTVORENÚ

Neukončujte aplikáciu. Vždy, keď sa telefón reštartuje, nezabudnite aplikáciu znova spustiť.



ZOSTAŇTE PRIPOJENÍ NA INTERNET

Nechajte svoj smartfón pripojený k sieti Wi-Fi[†] alebo mobilným dátam so SILNÝM signálom (signál je dostatočne silný, ak máte prístup na webovú stránku).



NEHAJTE ZAPNUTÚ FUNKCIU BLUETOOTH®

Režim v lietadle musí byť VYPNUTÝ (keď neleťíte).



ZOSTAŇTE V BLÍZKOSTI

Majte svoj telefón nablízku (1,5 metra), aj keď spíte.



VYPNITE REŽIM ÚSPORY ENERGIE

V nastaveniach telefónu vypnite funkcie šetrenia batérie/ optimalizácie/nízkej úrovne napájania pre mobilnú aplikáciu myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™.



NEHAJTE ZAPNUTÉ UPOZORNENIA

Povoľte upozornenia z mobilnej aplikácie myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™ a zapnite obnovenie aplikácie na pozadí/používanie údajov na pozadí.

V nastaveniach telefónu
sa aplikácia zobrazí ako
„Confirm Rx™“

**STIAHNITE SI MOBILNÚ
APLIKÁCIU MYMERLIN™
PRE MONITOR ICM
CONFIRM Rx™**

SME TU, ABY SME VÁM POMOHLI.

Navštívte stránku **ConfirmYourRhythm.com**
a stiahnite si ďalšie užitočné zdroje.

1. AFib Awareness. Heart.org. 2017. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/AFib-Awareness_UCM_476637_SubHomePage.jsp. Accessed 10 Nov, 2017.
2. Chugh S, Havmoeller R, Narayanan K, et al. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005119>Circulation. 2014;129:837–847.
3. Atrial Fibrillation Fact Sheet[Data & Statistics][DHDSP]CDC. Cdc.gov.2017. https://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_atrial_fibrillation.htm. Accessed 10 Nov, 2017.

Abbott

One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117 USA, Tel: 1 651 756 2000
Abbott.com

LEN NA LEKÁRSKY PREDPIS

Krátke zhrnutie: Pred použitím týchto pomôcok si prečítajte návod na použitie, kde nájdete kompletný zoznam indikácií, kontraindikácií, upozornení, preventívnych opatrení, potenciálne nežiaducich udalostí a pokyny na použitie.

Indikácie: Monitor ICM Confirm Rx™ je indikovaný na monitorovanie a diagnostické posúdenie pacientov, ktorí majú nevyšvetlené symptómy, ako sú závraty, palpitácie, bolesť v hrudníku, bezvedomie a dýchavica, ako aj pacientov s rizikom iných srdcových arytmií. Je indikovaný aj pre pacientov, ktorým bola predtým diagnostikovaná predsieňová fibrilácia alebo u ktorých existuje podozrenie na vývin predsieňovej fibrilácie. Monitor ICM Confirm Rx™ nebol špecificky testovaný na pediatrické použitie.

Kontraindikácie: Zavedenie monítora ICM Confirm Rx™ nemá žiadne známe kontraindikácie. Od konkrétneho zdravotného stavu pacienta však môže závisieť, či je možné tolerovať subkutánnu, chronicky zavedenú pomôcku.

Nežiaduce udalosti: Medzi možné nežiaduce udalosti (v poradí podľa abecedy), spojené s pomôckou, patria tieto: alergická reakcia, krvácanie, chronické poškodenie nervov, erózia, nadmerný rast fibrotického tkaniva, extrúzia, tvorba hematómov alebo cyst, infekcia, tvorba keloidov a migrácia. Podrobnosti o indikáciách, kontraindikáciách, varovaniach, bezpečnostných opatreniach a možných nežiaducich udalostiach nájdete v používateľskej príručke.

Dodatočné informácie: Lekári sa musia prihlásiť do siete starostlivosti o pacientov Merlin.net™ Patient Care Network (PCN), kde si môžu prezerat údaje odoslané z monítora ICM Confirm Rx™ svojich pacientov. V sieti Merlin.net™ PCN môžu nakonfigurovať harmonogramy odosielania údajov a aktivovať alebo deaktivovať funkcie na mobilnej aplikácii myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™ pacienta. Prezeranie odoslaných údajov závisí od lekára a nemusí sa uskutočniť bezprostredne po doručení týchto údajov.

Obmedzenia: Pacienti môžu používať vlastné mobilné zariadenie Apple® alebo Android® na vysielanie informácií zo svojho monítora ICM Confirm Rx™ pomocou mobilnej aplikácie myMerlin™ pre Confirm Rx™. Aby to bolo možné, zariadenie musí byť zapnuté, aplikácia musí byť nainštalovaná, bezdrôtová technológia Bluetooth® musí byť zapnutá a musí byť k dispozícii prenos údajov (mobilný alebo WiFi®). Mobilná aplikácia myMerlin™ pre Confirm Rx™ vykonáva pravidelné monitorovanie pacienta na základe nastavení nakonfigurovaných lekárom. Ak prenos nebol úspešne vykonaný, údaje sa odošlú znova. Existuje však množstvo vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré môžu zabrzdiť, oneskoriť alebo znemožniť získanie a doručenie informácií z monítora ICM a o pacientovi podľa úmyslu lekára. Medzi tieto faktory patrí: prostredie pacienta, dátové služby, operačný systém a nastavenia mobilného zariadenia, kapacita pamäte monítora ICM, nemocničné prostredie, zmeny harmonogramu/konfigurácie alebo spracovanie údajov.

Mobilný vysielač Abbott je k dispozícii pre pacientov, ktorí nemajú vlastné kompatibilné mobilné zariadenie.

™ znamená obchodnú známku skupiny spoločností Abbott.

‡ znamená obchodnú známku tretej strany, ktorá je vlastníctvom príslušného majiteľa.

Bluetooth a logo Bluetooth sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

© 2019 Abbott. Všetky práva vyhradené.

SJM-CFM-0419-0126(1)u | Dokument schválený na použitie v USA a mimo USA.

